

# AT560 (AT300) 說明書

SIZE: 90\*125MM 材質: 雙面銅版紙

## Инструкция по эксплуатации inspector AT300



### СОДЕРЖАНИЕ

Об устройстве .....	1
Правила пользования .....	1
Компоненты устройства .....	2
Установка элемента питания .....	3
Порядок эксплуатации .....	3
Аксессуары .....	5
Ошибки и неисправности .....	6
Важно знать .....	7
Замена модуля сенсора .....	7
Спецификации .....	9
Предупреждения .....	10
Гарантия .....	10


### Об устройстве

Данное устройство предназначено для измерения уровня алкоголя в крови человека через его дыхание. Результаты измерения будут представлены в промилле, процентах или граммах алкоголя в литре крови человека (в зависимости от заводских настроек).

### Правила пользования

- Перед использованием подождите не менее 15 минут с момента употребления алкоголя.
- Используйте устройство только при температуре в пределах 10-40°C

### Компоненты устройства

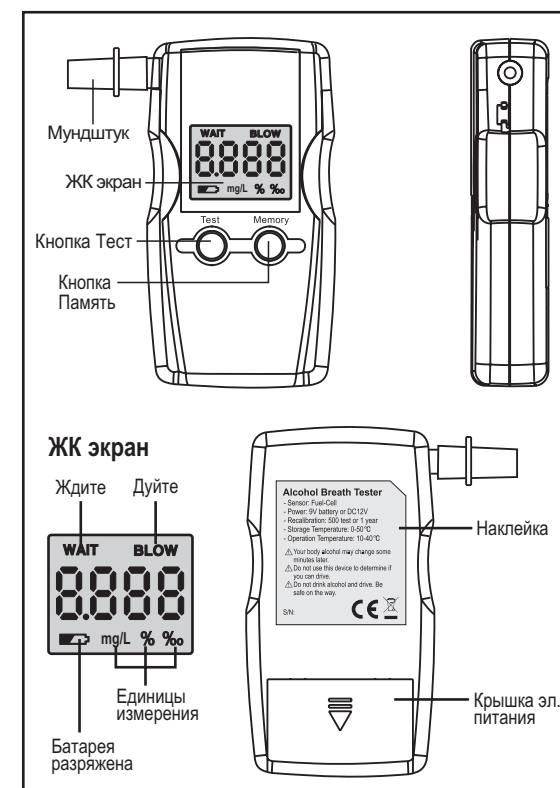


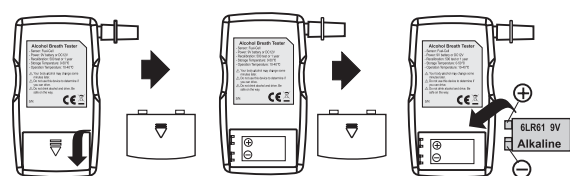
#### ЖК экран

Ждите Дуйте  
mgL %  
Батарея разряжена

Alcohol Breath Tester  
Power On Battery 0.000%  
Residual: 0.000 mgL in 1 cup  
Storage Temperature: 14.0°C  
CE  
Крышка эл. питания


### Установка элемента питания

- Сдвиньте вниз крышку батарейного отсека для установки элемента питания.
- Установите элемент питания 9В типа «Крона», строго соблюдая полярность.
- Если батарея разряжена, на ЖК экране появится символ «» и показания устройства могут быть некорректными. Необходимо заменить элемент питания.




### Порядок эксплуатации (Режим Тест)


- Вставьте один из мундштуков в отверстие с надписью 'blow in'.
- Нажмите и держите кнопку **ТЕСТ (TEST)** для включения устройства.

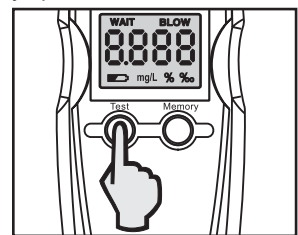

- На экране появится надпись **Ждите (WAIT)** и начнется обратный отсчет от 15 до 0.

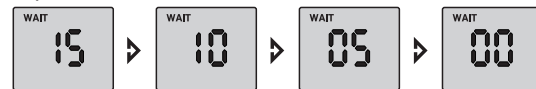

- Когда цифры дойдут до нуля и начнут моргать на экране появится надпись **Дуйте (BLOW)**. Сделайте глубокий вдох и дуйте в мундштук, пока не услышите окончания звукового сигнала, около 5 секунд.

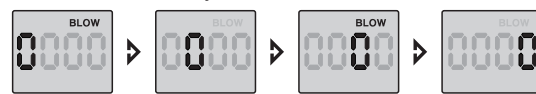


- По завершении теста на экране будет продемонстрирован Ваш результат в течение примерно 20 секунд.



### (Режим Память)

- По завершении теста, когда на экране демонстрируется Ваш результат в течение 20 секунд, нажмите кнопку **Память (Memory)** для сравнения с Вашими предыдущими результатами.

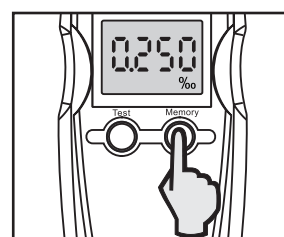




- Устройство выключится автоматически по завершении всех операций.
- Кнопка **Память (Memory)** предназначена только для этого режима

### Аксессуары

- Мундштуки
- Чехол

### Ошибки и неисправности


Ошибка или неисправность	Описание	Примечания
Не включается	- Нажмите и удерживайте кнопку <b>ТЕСТ (TEST)</b> до включения устройства; - Проверьте элементы питания.	
Отключается	- Низкий заряд элементов питания; - Превышение времени работы режима <b>ТЕСТ (TEST)</b> ; - Не производится никаких действий с устройством.	
	- Индикация разряда элементов питания; - Замените элементы питания; - Используйте только алкалиновые элементы питания.	
Звуковой сигнал	- Превышение уровня измерения алкоголя с отображением индикации <b>HI</b> ; - Проведено более 500 тестов, необходимо заменить модуль сенсора; - Во время продувания в режиме <b>ТЕСТ (TEST)</b> .	
HI	- Превышение уровня измерения алкоголя; - Отображаемый диапазон измерения: 0.000 - 0.800% BAC (или до 0.080% BAC, или до 0.400 мг/л)	

### Важно знать

- Перед использованием подождите не менее 15 минут с момента употребления алкоголя.
- После начала обратного отсчета дуйте, не останавливаясь, до прекращения звукового сигнала.
- Вызов занесенных в память результатов возможен только по окончании теста и демонстрации результата теста в течение 20 секунд.
- Используйте устройство только при температуре в пределах 10-40°C.
- Используйте только алкалиновые элементы питания 9В типа «Крона».
- Подождите не менее 30 секунд для повторной проверки.
- Подключение к прикуривателю с установленным элементом питания может вывести батарею из строя.
- Производите замену модуля сенсора каждые 6-12 месяцев или после 500 использований.
- После 500 использований устройство предупредит звуковым сигналом о необходимости замены модуля сенсора.
- Не оставляйте устройство в комнате с едким дымом.
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами.
- Избегайте сильных падений или повреждений устройства.

### Замена модуля сенсора

- Устройство подсчитывает количество использований и демонстрирует при включении.
- Сенсор может утратить абсолютную точность спустя несколько месяцев.
- Замену модуля сенсора стоит производить каждые 12 месяцев или после 500 использований.
- Устройство начнет подавать звуковой сигнал после 500 использований.
- Вам необходимо приобрести сменный модуль сенсора.
- Замените его в устройстве как показано ниже:

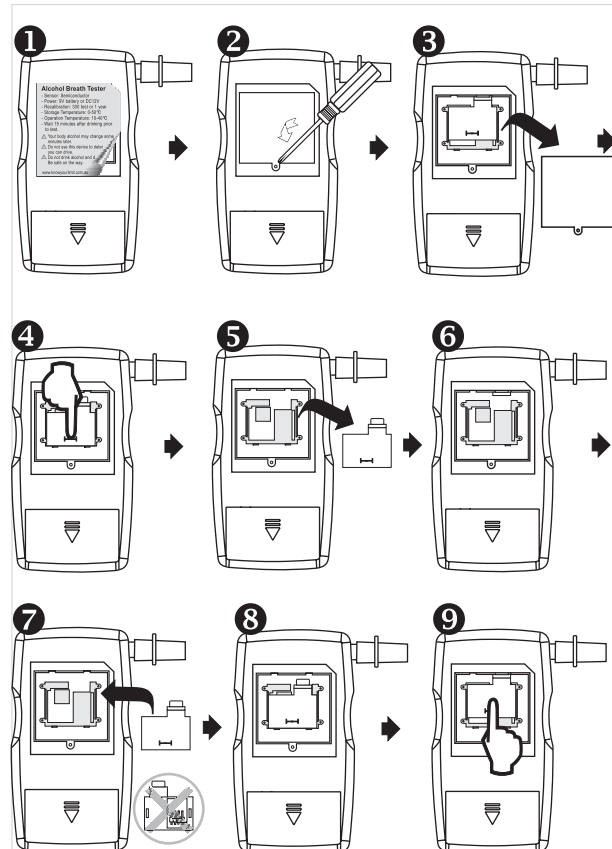

### Спецификации

- Полупроводниковый сенсор;
- Сменный модуль сенсора на 500 использований;
- Счетчик использований с звуковым оповещением;
- Диапазон измерений: 0.000-4.000% BAC (или до 0.400% BAC, или до 2.000 мг/л);
- Отображаемый диапазон: 0.000-0.800% BAC (или до 0.080% BAC, или до 0.400 мг/л);
- Надпись "HI", если результат превышает отображаемый диапазон;
- Точность показаний: +/-0.15% на 0.50% BAC;
- Память на 20 предыдущих показаний;
- 5 мундштуков в комплекте;
- Время готовности: 15 секунд;
- Время тестирования: 10 секунд;
- Повторный тест: через 60 секунд;
- Звуковой сигнал в случае результата выше 0.50% BAC;
- Индикация: 4-значный ЖК экран с подсветкой;
- Элемент питания: 9В алкалиновая батарея типа «Крона» (не входит в комплект поставки);
- Заряда батареи в среднем хватает на 200 использований;
- Индикация разряда батареи и функция авто-отключения;
- Температура использования: 10 С - 40 С; Температура хранения: 0 С - 50 С;
- Размеры устройства: 120 x 65 x 25 мм.

### Предупреждения

- ▲ Показания данного устройства не являются официальными и не могут быть использованы в суде, поэтому ни в коем случае не используйте устройство для определения момента, когда можно садиться за руль!
- ▲ Уровень содержания алкоголя в крови (BAC) может измениться спустя несколько минут после проверки, как в меньшую, так и в большую сторону!
- ▲ Для Вашей безопасности и безопасности окружающих не следует садиться за руль после принятия алкоголя вне зависимости от показаний данного устройства!

### Гарантия

**Срок гарантии на данное устройство – 12 месяцев или 500 тестов (в зависимости от того, что из этих событий наступит раньше).**

**Внимание:** Гарантия не распространяется на калибровочные работы в течение всего срока эксплуатации устройства.

**Данное устройство может быть принято в гарантийный ремонт только при наличии инструкции по эксплуатации, содержащей таблицу технического обслуживания, или при наличии фирменного гарантийного талона INSPECTOR. Оба документа должны обязательно содержать серийный номер устройства, дату продажи и печать продавца.**

Адрес сервисного центра INSPECTOR:  
142171, МО, г. Шербинка, ул. Южная, д.8  
Тел.: +7 (495) 505-9780  
E-mail: support@rd-inspector.ru  
WEB: www.rd-inspector.ru, www.rg-avto.ru

Адрес завода-изготовителя:  
Скайлайн Инж. Лимитед  
No. 17, Байяньшан Эконом Рид, Дайлиншан Таун, Донгуан Сити,  
Гуандунг Провинс, Китай