

Инструкция по эксплуатации
inspector AT800



СОДЕРЖАНИЕ

Об устройстве.....	3
Правила пользования.....	3
Компоненты устройства.....	3
Установка элемента питания.....	4
Порядок эксплуатации.....	4
Аксессуары.....	6
Ошибки и неисправности.....	6
Важно знать.....	7
Спецификации.....	7
Таблица технического обслуживания.....	8
Предупреждения.....	9
Гарантия.....	9

Об устройстве

Данное устройство предназначено для измерения уровня алкоголя в крови человека через его дыхание. Результаты измерения будут представлены в единицах промилле или миллиграммах алкоголя в литре выдыхаемого воздуха человека (в зависимости от заводских настроек).

Правила пользования


- Перед использованием подождите не менее 15 минут с момента употребления алкоголя.
- Используйте устройство только при температуре в пределах 10~40°C.

Компоненты устройства



Установка элемента питания

- Сдвиньте вниз крышку батарейного отсека для установки элемента питания.
- Установите элемент питания 9В типа «Крона», строго соблюдая полярность.

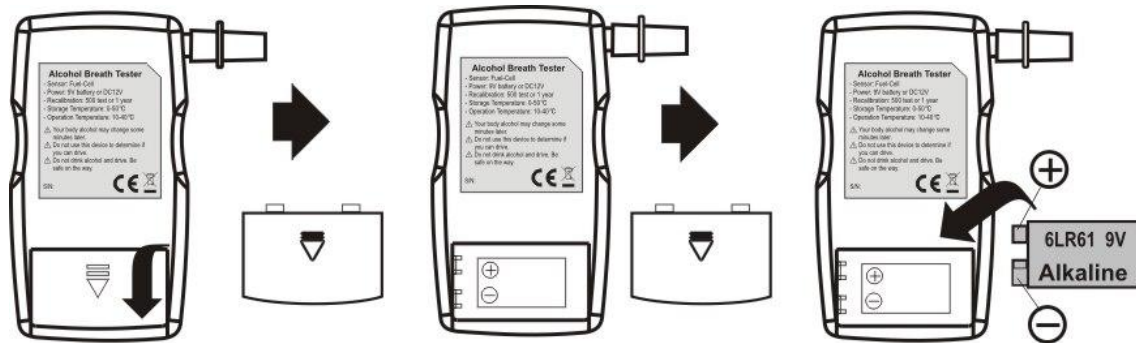


- Если батарея разряжена, на ЖК экране появится символ “” и показания устройства могут быть некорректными. Необходимо заменить элемент питания.


Порядок эксплуатации

(Режим Тест)

- Вставьте один из мундштуков в отверстие с надписью ‘blow in’.

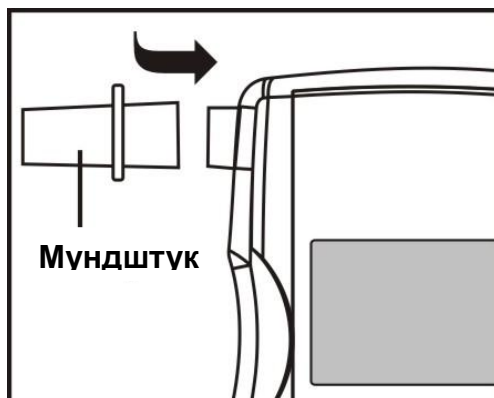


- Нажмите и держите кнопку ТЕСТ (TEST) для включения устройства.

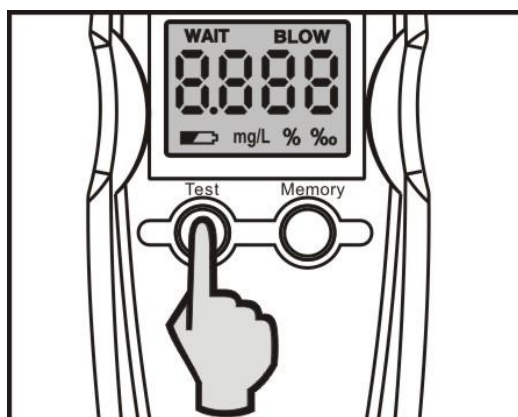


- На ЖК экране появится количество произведенных тестов.




- Далее появится надпись Ждите (WAIT) и начнется обратный отсчет от 15 до 0.

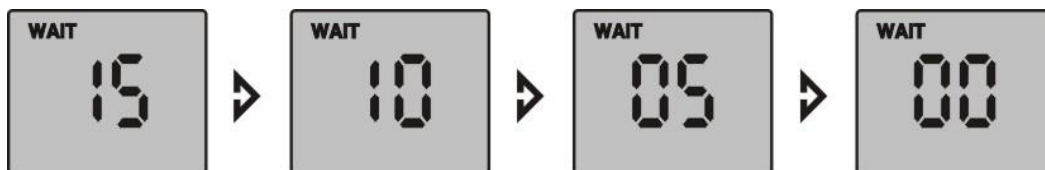


- Когда цифры дойдут до нуля и появится «бегущая» буква С на экране появится надпись Дуйте (BLOW). Сделайте глубокий вдох и дуйте в мундштук, пока не услышите окончания звукового сигнала, около 6 секунд.

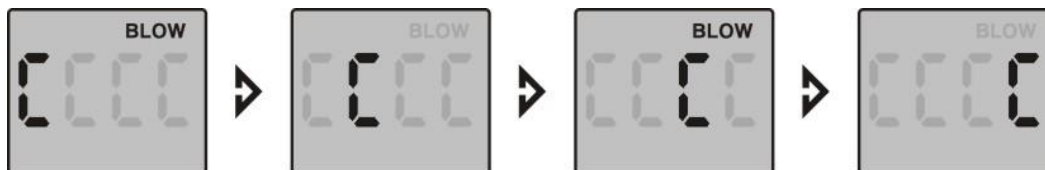

- Затем появится надпись Ждите (WAIT) и появится «бегущий» ноль на экране.

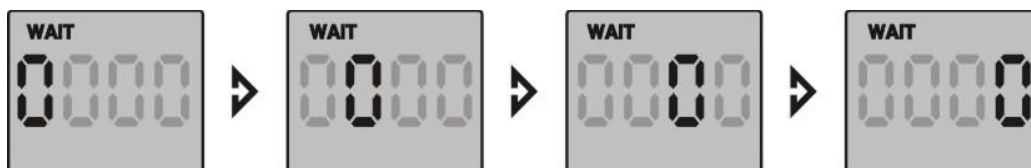

- Ваш результат тестирования появится на экране в течение 20 секунд.

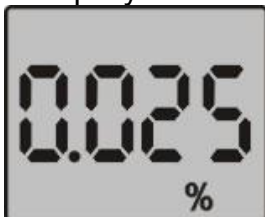


- В случае неправильного выдоха устройство выдаст ошибку (Err) и отключится. В

этом случае обратитесь к разделу “Ошибки и неисправности”.



(Режим Память)

- По завершении теста, когда на экране демонстрируется Ваш результат в течение 20 секунд, нажмите кнопку Память (Memory) для сравнения с Вашими предыдущими пятью результатами.

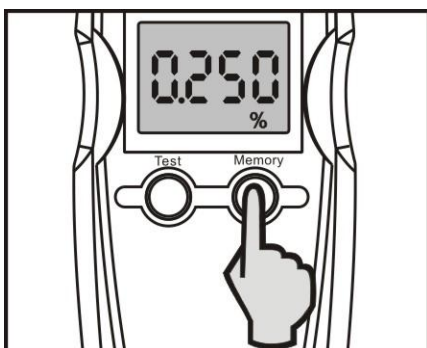

- После 20 секунд устройство будет выключено.
- Кнопка Память (Memory) предназначена только для этого режима.

Аксессуары

- Мундштуки
- Чехол

Ошибки и неисправности

Ошибка или неисправность	Описание	Примечания
Не включается	- Нажмите и удерживайте кнопку ТЕСТ (TEST) до включения устройства; - Проверьте элементы питания.	
Отключается	- Низкий заряд элементов питания; - Превышение времени работы режима ТЕСТ; - Не производится никаких действий с устройством.	
Err	- Выдох нестабильный, прерывистый; - Выдох длился менее 6 секунд; - Выдох слишком слабый; - Выдох не был произведен; - Внезапное изменение температуры.	

	- Индикация разряда элементов питания; - Замените элементы питания; - Используйте только щелочные элементы питания.	
Звуковой сигнал	- Во время выдоха в режиме ТЕСТ (TEST) - Возникло сообщение об ошибке (Err) - Превышение уровня измерения алкоголя	
HI	- Превышение уровня измерения алкоголя. - Отображаемый диапазон измерения: 0.000 – 2.000‰ ВАС (или до 1.000 мг/л)	

Важно знать

- Перед использованием подождите не менее 15 минут с момента употребления алкоголя.
- После начала обратного отсчета дуйте, не останавливаясь, до прекращения звукового сигнала.
- Устройство выдаст ошибку (Err) в случае отсутствия, короткого или прерывистого выдоха.
- Если резко изменилась температура окружающей среды, подождите несколько минут перед использованием.
- Используйте устройство только при температуре в пределах 10~40°C.
- Производите рекалибровку устройства каждые: 12 месяцев
- Не оставляйте устройство в комнате с едким дымом.
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами.
- Избегайте сильных падений или повреждений устройства.

Спецификации

- Электрохимический сенсор (Fuel Cell Sensor);
- Время продува: 6 сек.;
- Пропускная способность: 10л/мин.;
- Отображаемый диапазон: 0.000-2.000‰ ВАС;
- Надпись "HI", если результат превышает отображаемый диапазон;
- Точность показаний: +/-0.05‰ at 0.50‰ ВАС;
- Память на 5 предыдущих показаний;
- 5 мундштуков в комплекте;
- Время готовности: 15 сек.;
- Время тестирования: 10 сек.;
- Повторный тест: через 60 сек.;
- Звуковой сигнал в случае результата выше 0.50‰ ВАС;
- Индикация: 4-хзначный ЖК экран с подсветкой;
- Элемент питания: 9В щелочная батарея типа «Крона» (не входит в комплект);
- Заряда батареи в среднем хватает на 500 использований;

- Индикация разряда батареи и функция авто-отключения;
- Температура использования: 10°C - 40°C;
- Температура хранения: -10°C - 50°C;
- Размеры устройства: 125 x 67 x 28 мм;
- Калибровка через каждые: 12 месяцев;
- Контроль непрерывного выдоха.

Таблица технического обслуживания (калибровки) устройства

- В процессе использования данного устройства с электрохимическим сенсором точность его измерений со временем может ухудшаться.
- Производитель рекомендует производить калибровку устройства каждые 12 мес. В противном случае результаты Вашего тестирования могут оказаться неверными.

[illegible]

Предупреждения

- ! Показания данного устройства не являются официальными и не могут быть использованы в суде, поэтому ни в коем случае не используйте устройство для определения момента, когда можно садиться за руль!
- ! Уровень содержания алкоголя в крови (ВАС) может измениться спустя несколько минут после проверки, как в меньшую, так и в большую сторону!
- ! Для Вашей безопасности и безопасности окружающих не следует садиться за руль после принятия алкоголя вне зависимости от показаний данного устройства!

Гарантия

Срок гарантии на данное устройство – 12 месяцев или 500 тестов (в зависимости от того, что из этих событий наступит раньше).

Внимание: Гарантия не распространяется на калибровочные работы в течение всего срока эксплуатации устройства.

Данное устройство может быть принято в гарантийный ремонт только при наличии инструкции по эксплуатации, содержащей таблицу технического обслуживания, или при наличии фирменного гарантийного талона INSPECTOR. Оба документа должны обязательно содержать серийный номер устройства, дату продажи и печать продавца.

Устройство не подлежит бесплатному сервисному обслуживанию в случае, если:

- ! Утерян или неправильно заполнен гарантийный талон или инструкция по эксплуатации, содержащая таблицу технического обслуживания, не указана дата продажи, отсутствует печать продавца;
- ! Были нарушены правила эксплуатации устройства;
- ! Устройство подвергалось механическим повреждениям, в результате перегрева (огня), аварии, при наличии коррозии элементов в результате воздействия влаги (воды) или агрессивных жидкостей, использования не по прямому назначению, небрежного обращения, неквалифицированных попыток вскрытия или ремонта;
- ! Были использованы некачественные элементы питания.

Адрес сервисного центра INSPECTOR:

142171, МО, г. Щербинка, ул. Южная, д.8

Тел.: +7 (495) 505-9780

E-mail: support@rd-inspector.ru

WEB: www.rd-inspector.ru, www.rq-avto.ru

Адрес завода-изготовителя:

Скайфайн Инк. Лимитед

Но. 17, Байнишан Зхонг Рд., Дайлингшан Таун, Донггуан Сити,
Гуангдонг Провинс, Китай